



Tilt og ryggvinkel

Setetilt og ryggvinkel gir bruker mulighet for viktig stillingsendring i løpet av dagen. Hendene for rygg- og sete vinkel er plassert på kjørebøylen.

- Reguler ryggvinkelen ved hjelp av den høyre hendelen.
- Tilt setet ved hjelp av den venstre hendelen



Tippesikring med vippestuss

Tippesikringen sikrer rullestolen mot å tippe bakover. Sørg alltid for at tippesikringen er aktivert når rullestolen er i bruk.

Deaktiver tippesikringen når du skal forser fortauskanter eller lignende. Sett deretter en fot på vippestussen samtidig som du styrer med kjørehåndtakene. Husk å aktivere tippesikringen igjen etter forsering av hinder.



Krasjtestet

Rullestolen kan benyttes som passasjer sete i bil og er godkjent henhold til ISO 7176-19.


Rullestolen har avmerket fire festepunkter som må brukes ved fastspenning i motorkjøretøy.



Slidesete

Bruk slidesetefunksjonen for å regulere setedybden og for en enklere og mer skånsom forflytning av brukeren til/fra rullestolen.

- Sett setet i horisontal stilling
- Skyv hendelen (A) bakover samtidig som du tar tak i håndtaket (B) og drar eller skyver setet til ønsket posisjon.

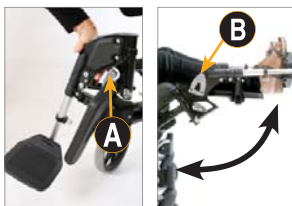

Vinkelstillbare benstøtter

Benstøttene er ut/innsving- og avtakbare for enklere forflytning til og fra rullestolen.

- Benstøtten løses ut ved å vri hendelen (A) inn- eller utover.
- Benstøtten kan løftes rett opp og tas helt av dersom dette er ønskelig. For å sette den på igjen, gjøres operasjonen i motsatt rekkefølge. Hendelen (A) låser automatisk.
- Benstøttevinkelen reguleres ved å svinge ut hendelen (B) og regulere til ønsket posisjon. Lås vinkelen ved å skyve hendelen tilbake.




Felle ryggen opp og ned

Ryggen felles enkelt ned

- Tilt stolen framover.
- Ta av armlenene
- Trekk ut bolten (A) og fold ned ryggen.

Utfør prosedyren i motsatt rekkefølge for å felle opp ryggen.

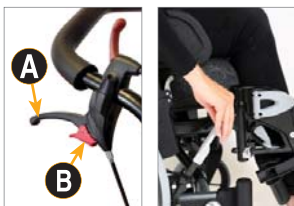

Ledsagerbrems

- Klem inn bremsehåndtakene (A) for å bremse
- Skyv utløserhendelen (B) fra deg for å sette bremsen i låst posisjon ved parkering. Klem utløserhendelen inn for å løse ut bremsen

Brems - brukerbetjente

Trekk bremsespaken mot deg når bremsen skal låses.

⚠ De brukerstyrte bremsene er kun konstruert for å holde stolen når denne skal stå stille. De må ikke brukes som kjørebrems.



Sunrise Medical AS

Dynamitveien 14B

1400 SKI

T: 66 96 38 00

F: 66 96 38 80

E: post@sunrisemedical.no

www.sunrisemedical.no

I henhold til NAVs retningslinjer, skal hodestøtte monteres dersom rullestolen skal benyttes som passasjer sete i bil.

📖 Les mer om sikkerhet i bil i rullestolens brukermanual.




CIRRUS G5

Cirrus G5

HURTIGMANUAL

Når du mottar rullestolen

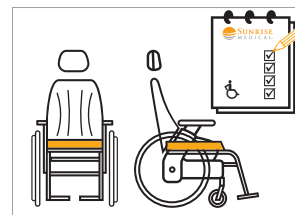


Rullestolen leveres i setebredder i intervallet 39-54 cm og setedybde 44-50 cm (+/- 5 cm slidesete). Kontroller at rullestolen du har mottatt har korrekte mål i henhold til din bestilling. Angivelse av rullestolens mål finner du avmerket på krysset, under setet.




Rullestolen leveres komplett. Det eneste du trenger å gjøre er å folde opp ryggen og sette på armlener og benstøtter.

- Fell opp ryggen og sett i bolten (A)
- Sett på armlenene og benstøttene
- Legg seteputen (tilbehør) på plass, påse at den ligger riktig på seteplaten.

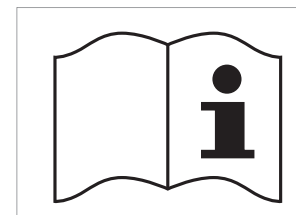

For din egen sikkerhet, og for å få best mulig utbytte av mulighetene i din nye rullestol, anbefaler vi at du leser brukermanualen nøye før du tar i bruk rullestolen.

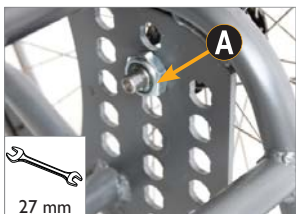

Setehøyde bak og balansepunkt

Setehøyden bak kan justeres i intervallet 47-52 cm (44,5-49,5 cm uten sleidesete) (38-55 cm med bytte av deler).


Tyngdepunktet kan justeres for å tilpasse kjøreegenskapene til den enkelte.

- Løsne festemutteren **A**
- Flytt drivhjulshylsen til ønsket hull.
- Sett på festemutteren og trekk godt til

Setehøyde foran

Setehøyde foran justeres i samme intervaller som setehøyde bak. Setehøyde foran kan endres på ulike måter:

- Bytte til større eller mindre svinghjul
- Bytte til kortere eller lengre svinghjulsgaffel

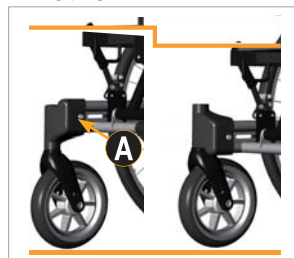


- Flytte svinghjulet opp eller ned i svinghjulsgaffelen (avhengig av størrelse på svinghjul og svinghjulsgaffel)
- Snu lagerhuset 180° og flytte det til motsatt side
- Legge til eller fjerne avstandsstykker mellom lagerhus og gaffel

Snu lagerhuset

- Skru ut skruen **A**
- Demonter gaffel og hjul
- Snu lagerhuset 180° og monter det på motsatt side.
- Monter gaffel og hjul
- Skru til skruen **A**

Legge til eller fjerne avstandshylser


- Demonter gaffel og hjul
- Legg til eller fjern avstandsstykker **A**
- Monter gaffel og hjul

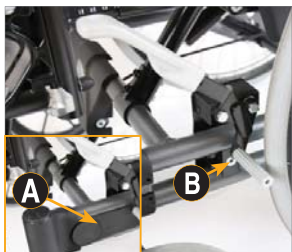

Innstilling av bremsene

Etter justering av setehøyde bak eller tyngdepunkt, er det viktig å kontrollere og/eller etterjustere bremsene.

- Ta av dekselet **A**
- Løsne skruen **B**
- Flytt bremsen etter sporet til ønsket posisjon. Riktig avstand mellom bremsekloss og hjul er ca 5 mm, når bremsen ikke er aktivert

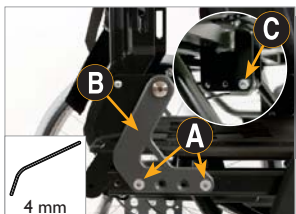

Setedybde

Setedybden kan justeres i tre steg 44, 47 og 50 cm ved å flytte ryggbrakketten **B** fram- eller bakover. I tillegg gir sleidesetet +/- 5 cm i setedybde.

- Fell ned ryggen slik at den hviler mot setet.
- Skru ut skruene **A** på begge sider av rullestolen. Flytt ryggbrakketten til ønsket posisjon og skru inn boltene igjen. Det må alltid være ett eller to åpne hull mellom boltene.
- Skru ut gassdemperskruen **C** og flytt til det hullet som samsvarer med hullene i ryggbrakketten.



Hodestøtte

Hodestøtten reguleres i høyde, dybde og vinkel.

- Løsne låsehendlene **A**, reguler til ønsket dybde og vinkel og skru til hendlene
- Løsne låserattet **B**, hev eller senk hodestøtten til ønsket posisjon og skru til låserattet igjen




- Puten har innebygde bånd **C** som reguleres for å gi optimal støtte for hodet.



Ryggkurvatur


En godt polstret ryggpute gir god komfort over tid. Båndene i ryggen kan reguleres slik at rullestolryggen former seg for maksimal støtte og komfort. Du kommer til velcrobåndene ved å løsne ryggtrekket på baksiden av ryggen.

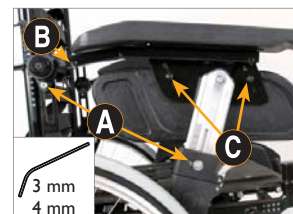

Justering av armlener

Armlenene, som følger ryggen ved ryggvinkelregulering, kan justeres i høyde, dybde og vinkel, for optimal støtte av armene.

- Juster høyden ved å løsne skruene **A**, hev eller senk armlenet til ønsket posisjon og stram til skruen igjen. Benytt måleskalaene som veiledning.
- Juster dybden ved å løsne skruen **B** og skyve armlenet til ønsket dybde. Når armlenet er justert til ønsket posisjon, kan du flytte klesbeskytteren for å unngå åpninger mot hjulet.
- Løsne skruene **C**, dra/skyv klesbeskytteren til ønsket posisjon og skru til skruene igjen

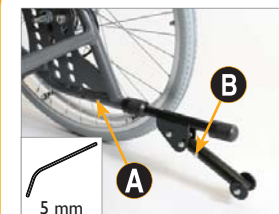


Justering av tippesikring

Juster tippesikringen når du har endret setehøyden eller tyngdepunktet på stolen.

- Skru ut skruen **A**. Dra eller skyv tippesikringen til riktig horisontal posisjon. Sett inn skruene og stram til
- Skru ut skruene **B**. Dra eller skyv tippesikringen til riktig vertikal posisjon. Sett inn skruene og stram til (Illustrasjonen kan avvike fra tippesikringen som er montert på rullestolen)



CIRRUS GS

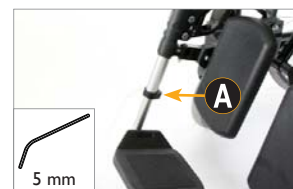

Benstøttelengde

Lengden ned til fotplaten kan justeres trinnløst.

- Løsne festeskruen **A** ca 5 mm
- Juster benstøtten til ønsket lengde og stram til skruen igjen
- Benytt måleskalaen som veiledning